


SOFT CONTACT LENSES: INSTRUCTION FOR USE
A Guide to Trouble-Free Soft Contact Lens Wear

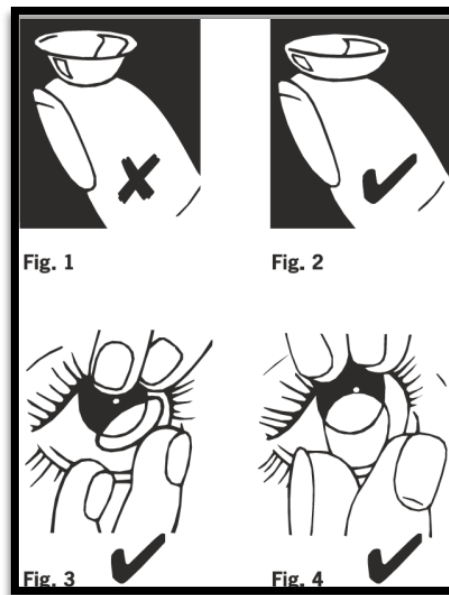

RO

Spalati-va întotdeauna pe mâini înainte de a atinge lentilele de contact.

Nu le folosiți dacă ambalajul nu este sigilat.

Nu împrumutați lentilele dumneavoastră altei persoane și nici nu folosiți lentilele de contact ale altei persoane.

APLICAREA LENTILELOR

1. Înainte de a introduce lentilele, asigurați-vă ca acestea nu sunt poziționate invers. Puneți lentilele pe vârful degetului arătător ca să le veriți forma (Fig. 1 și 2).
2. Folosindu-vă de degetul mijlociu, inei pleoapa inferioară apăsata în jos. Folosiți degetul arătător de la cealaltă mână ca să ridicați pleoapa superioară. Poziționați lentila pe suprafața ochiului (Fig. 3). Repetați aceeași procedură și pentru celălalt ochi.

SCOATEREA LENTILELOR

Separă pleoapele cu degetul mijlociu de la fiecare mână. Priviți în sus și cu degetul arătător glisați lentila pe suprafața ochiului și prindeți-o cu ajutorul degetului mare și al arătătorului (Fig. 4). Repetați aceeași procedură și pentru celălalt ochi.

DEZINFECTAREA/ÎNMUIEREA

Pentru lentilele de contact care se folosesc de mai multe ori, curățați și dezinfectați urmând cu strictețe instrucțiunile de pe sticlă cu soluție sau după cum v-a indicat specialistul dumneavoastră.

N.B. Lentilele de unică folosință sunt destinate să fie folosite numai o singură dată și apoi aruncate. Dacă lentilele dumneavoastră sunt de unică folosință, NU LE FOLOSIȚI mai mult de o singură dată. Lentilele de unică folosință nu sunt destinate pentru a putea fi curățate sau dezinfectate sau pentru a fi purtate mai mult de o singură dată. Lentilele de unică folosință purtate de mai multe ori pot deveni uzate și vă pot expune la un risc ridicat de infecții ale ochilor sau pot cauza alte probleme datorate îngrijirii și mănuirii acestora.

DACA LENTILELE ÎȘI PIERD HIDRATAREA

Reumeziți lentilele din nou cu soluția pentru dezinfectare, înmuiere și clătire apoi urmați pașii de mai sus pentru Dezinfectare/Înmuiere.

PRECAUȚII

1. Pentru toate tipurile de lentile de contact, specialistul dumneavoastră o să vă recomande un regim specific de purtare, curățare și înlocuire. Urmăriți aceste recomandări cu strictețe. Dacă aveți îndoieli cereți sfatul specialistului.
2. Dacă purtați lentile de contact pentru o durată mai lungă de timp, scoateți și aruncați lentilele folosite seara înainte de înlocuirea lentilelor și aplicați lentilele noi ziua următoare.

3. Dacă ochii dumneavoastră devin roșii sau iritați sau dacă suferiți vreo durere sau schimbări neașteptate de vedere, scoateți lentilele imediat și consultați-vă cu specialistul dumneavoastră.
4. Evitați contaminarea lentilelor cu produse cosmetice, spray-uri pulverizante sau purtarea acestora în apropierea fumurilor nocive.
5. Înlocuiți imediat lentilele uzate, contaminate sau care prezintă zgârieturi.
6. Evitați să aveți unghii lungi care adăpostesc bacterii și care pot produce uzuri lentilelor sau rani ochilor. Ochiul care suferă zgârieturi este vulnerabil la diferite infecții.
7. Pastrați lentilele la un loc inaccesibil copiilor.
8. Folosiți lentilele în timpul practicării sporturilor acvatice, numai în cazul în care purtați ochelari de înot rezistenți la apă.

AVERTIZARI

1. **NU** dormii cu lentilele de contact, numai dacă specialistul dumneavoastră v-a sfătuit ca sunteți în afara oricărui pericol pentru sănătatea dumneavoastră.
2. **NU** folosiți lentilele de contact peste termenul recomandat de către specialistul dumneavoastră.
3. **NU** folosiți produse de uz casnic pentru curățarea lentilelor (de ex. dezinfectanți).
4. **NU** purtați lentilele de contact când folosiți picături de ochi (cu excepția cazului în care specialistul dumneavoastră v-a sfătuit să o faceți).
5. **NU** folosiți salivă pentru a umezi lentilele.
6. **NU** clătiți lentilele cu apă de la robinet.